

**orthocaps**<sup>®</sup>  
creating smiles

distribué par



# Le système **TwinAligner**<sup>®</sup>

- # technologie de pointe
- # s'intègre facilement à votre pratique
- # haute précision



# Systeme et avantages

Technologie intelligente d'aligneurs pour des résultats précis et visibles

Le système TwinAligner® d'Orthocaps® est aujourd'hui la nouvelle référence en orthodontie. Des années d'expérience clinique ont permis de développer les aligneurs Orthocaps : leur conception fait appel à des matériaux biocompatibles haute performance. Résultat : un système invisible, hautement efficace et bien toléré par les patients permettant une correction dans de nombreuses indications. La technologie Orthocaps va encore plus loin et propose deux innovations grâce à un matériau bi-composant et le système TwinAligner®, pour des résultats visibles et précis.



## # Nouveau Matériau bi-composant

Les aligneurs Orthocaps sont conçus dans un matériau bi-composant thermoplastique aux propriétés haute performance. La surface extérieure, plus rigide, garantit stabilité et durabilité alors que la surface intérieure souple permet un ajustement parfait. Le tout assure confort, précision du résultat et satisfaction des patients.



### Choix de traitements

Nos différentes options de traitements Orthocaps® répondent aux besoins et spécificités des patients quel que soit leur âge, permettant ainsi de corriger près de 90 % des malocclusions.



### Résultats précis

Les caractéristiques uniques des aligneurs Orthocaps associées à un plan de traitement à la fois détaillé et personnalisé assurent des résultats remarquables et conformes aux attentes.



### Technologie TwinAligner®

Nos aligneurs se composent de matériaux biocompatibles haute performance grâce à une technologie de pointe. Pour chaque traitement, nous proposons deux aligneurs distincts qui apportent à la fois des forces légères et un meilleur contrôle du mouvement. Discrets, les DAYcaps agissent tout en douceur pendant la journée tandis que les NIGHTcaps, plus rigides, se portent la nuit.



### Suivi optimal du traitement

A la fin de chaque phase du traitement, une évaluation 3D détaillée permet de suivre la progression de celui-ci et de s'assurer de son bon déroulement.



DAYcaps



NIGHTcaps

### Qualité Made in Germany

Les aligneurs Orthocaps sont fabriqués sur notre site, à Hamm, en Allemagne. Nous pouvons ainsi garantir un niveau de qualité irréprochable et une grande réactivité.



# Notre offre

## À chaque malocclusion, une solution adaptée

De la simple correction esthétique aux malocclusions plus complexes, Orthocaps apporte une solution dans pratiquement 90 % des cas grâce à son système adapté à l'indication et l'âge des patients. Chaque patient bénéficie ainsi d'un traitement précis et personnalisé.

Enfants Adolescents Adultes

### orthocaps® PRO

Système de traitement polyvalent, qui permet de traiter 90 % des malocclusions. Individualisation du traitement possible.



**Indications:** Supraclusion, béance, surplomb vertical, malposition, Classe 2, encombrement, arcade étroite

### orthocaps® KIDS

Système spécifique aux dentitions mixtes. Les aligneurs se portent uniquement la nuit (12 h). Convient aux enfants de 9 à 12 ans.



**Indications:** Manque d'espace, supraclusion, béance, surplomb vertical, malposition, Classe 2, encombrement, arcade étroite, dentition mixte.

### orthocaps® NOCTIS

Parfait pour ceux dont l'activité professionnelle est incompatible avec un traitement orthodontique. Les aligneurs se portent uniquement la nuit (12 h) et les week-ends en journée dans la mesure du possible.



**Indications:** malpositions esthétiques antérieures (encombrement, malposition, diastème).

### orthocaps® TEN

Rapport qualité/prix optimal avec un maximum de **10 sets d'aligneurs** pour le traitement des malocclusions légères. Peut être commandé sans avoir recours au logiciel (iSetup®).



### orthocaps® 10&10

Rapport qualité/prix optimal avec un maximum de **20 sets d'aligneurs** pour le traitement des malocclusions légères. Peut être commandé sans avoir recours au logiciel (iSetup®).



**Indications:** malpositions esthétiques légères antérieures (encombrement, déviation, diastème), correction de l'arcade dentaire.



# Déroulement du traitement

Tellement simple avec Orthocaps® !

Le système Orthocaps TwinAligner® s'intègre en toute simplicité à votre pratique. Grâce à nos formations et un plan de traitement à la fois clair et structuré, nos utilisateurs ne rencontrent généralement aucune difficulté. Et pour toute question, nos spécialistes sont là pour vous accompagner.



# Auxiliaires

### # ÉTAPE 1: Soumission de cas en ligne

Envoyez-nous simplement des clichés extra et intraoraux, nous vous ferons savoir dans les 48 heures si votre patient peut être traité avec Orthocaps®.




### #ÉTAPE 3: Plan 3D du traitement

Nous utilisons les empreintes fournies pour réaliser un modèle 3D numérique avec visualisation du résultat en fin de traitement. Si besoin, vous pouvez le modifier à tout moment en allant sur votre compte Orthocaps.



### #ÉTAPE 5: Phases de traitement clairement définies

Vous recevez huit sets d'aligneurs numérotés par phase de traitement, à remettre à vos patients lors des contrôles en cours de traitement.

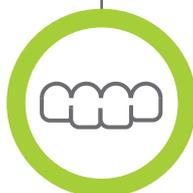

### #ÉTAPE 2: Dossier patient et envoi de la commande

Avant toute commande, nous aurons besoin de scans ou d'empreintes en silicone (mandibulaires et maxillaires), empreinte d'occlusion, photos, panorax. Les scans intraoraux numériques peuvent nous être transmis par voie électronique.

### #ÉTAPE 4: Aligner Orthocaps® sur mesure

Une fois l'objectif du traitement déterminé, nous procédons à la fabrication sur mesure des aligneurs Orthocaps. Vous recevez le premier set d'aligneurs entre 2 et 3 semaines plus tard.

### #ÉTAPE 6: Évaluation 3D de la progression du traitement

Une évaluation 3D détaillée est réalisée à la fin de chaque phase de traitement. Cela vous permet de réagir rapidement en cas d'écart et d'ajuster le plan de traitement en conséquence.

# Auxiliaires

Le même objectif de perfection pour les cas complexes

Que vous soyez à la recherche de méthodes innovantes dans le cadre d'un traitement associé ou d'une solution de contention adaptée, Orthocaps® a la réponse à vos besoins. Sa gamme d'auxiliaires complètera vos traitements afin de vous garantir des résultats parfaits pour vos patients.

## HAT (Hybrid-Aligner -Traitement)


Ce système innovant fait simultanément appel aux aligneurs et aux appareils fixes.

Le traitement hybride HAT est la solution idéale lorsqu'un traitement uniquement par aligneurs ne suffit pas.



## BiteMaintainer

Il s'agit d'un positionneur en silicone dentaire qui servira à la contention et à la finition chez tous les patients.

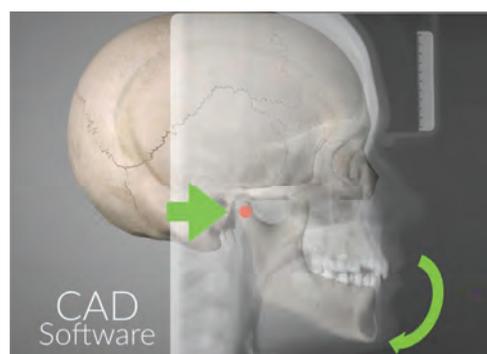



## Patin de friction

Innovation dans le domaine des attaches :

Les patins de friction sont particulièrement fins et quasi invisibles, un argument de taille pour convaincre les patients.



## Attaches préformées

Les attaches préformées améliorent la qualité du mouvement et sont pré-intégrées dans l'aligneur.

Pour plus de discrétion, il est possible de choisir la couleur des attaches pour qu'elle se rapproche de celle des dents.



# Logiciel

Plan de traitement simple grâce à des fonctionnalités pensées pour votre pratique

iSetup® est un outil puissant qui vous permet de simuler et visualiser avec précision chaque phase de traitement. Ce logiciel hébergé sur le cloud est compatible avec les systèmes d'exploitation existants et propose une utilisation intuitive pour faciliter sa prise en main.



## # orthocaps® iSetup® 3-D

Ses nombreuses fonctionnalités innovantes vous permettront d'expliquer très clairement à vos patients la progression et les objectifs du traitement, ce qui aura pour effet de les motiver et d'encourager leur coopération.


# prise en main facile de la nouvelle version 3D iSetup

# plan de traitement clair et intuitif

# suivi des résultats intermédiaires

# outils pour apporter les changements dans iSetup

# déplacez les dents et placez les attaches à votre guise

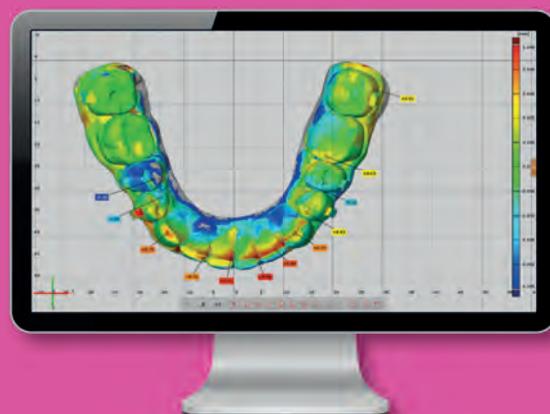

## # Évaluation 3D de la progression du traitement

Une évaluation 3D détaillée est réalisée à la fin de chaque phase de traitement. Cela vous permet de réagir rapidement en cas d'écart et d'ajuster le plan de traitement en conséquence.

# Plan et suivi de traitement optimal

# Identification continue des zones à problèmes

# modèles de progression et objectifs clairs

# analyse de l'efficacité tout au long du traitement

# facilité d'ajustement du plan





De la simple correction esthétique aux malocclusions plus complexes, Orthocaps apporte une solution dans pratiquement 90 % des cas quel que soit l'âge puisque nous proposons des aligneurs adaptés aux besoins des enfants, adolescents et adultes. Orthocaps propose une solution précise et personnalisée ! Il vous suffit de parler d'Orthocaps à votre praticien, il saura vous conseiller sur le système qui vous convient le mieux.

Enfants ✓  
Adolescents ✓  
Adultes ✓

**#Qui** peut en  
bénéficier ?

« Avoir un écart entre les dents m'a très longtemps gêné et empêché de sourire. Avec le traitement orthocaps je suis devenu beaucoup plus détendu et j'ose finalement sourire pleinement, sans complexe. Cela rend ma vie beaucoup plus facile - au travail comme à la maison. »

Alexander S. (27 ans)

**DIAGNOSTIC** : Diastème; redressement; correction de rotations.

**DURÉE** : 11 mois

**RÉSULTATS** : Un beau sourire

# #orthocaps®

## Exemple de cas

Avant :(



Après :)



# Support et assistance

Conseil et support par des spécialistes

Chez Orthocaps®, nous sommes proches de nos clients-praticiens et avons comme vocation de proposer des solutions qui puissent satisfaire vos attentes et celles de vos patients au quotidien. De ce fait, vous pouvez compter sur nous à tout moment. Grâce à notre réseau d'experts composé d'orthodontistes, techniciens et consultants, nous mettons notre savoir-faire à votre disposition pour vous accompagner.

## # Conseil téléphonique

Un service téléphonique dédié aux questions d'orthodontie, dentaires, production et conseils est disponible de 9h à 17h..

## # Interlocuteur privilégié

Nous sommes également à votre disposition pour une réponse personnalisée. Il suffit de prendre rendez-vous et nous organiserons un échange avec l'un de nos spécialistes.

## # Assistance en ligne

Notre portail utilisateur vous permettra de prendre contact rapidement et en toute simplicité avec Orthocaps.

# Service



# Traitement orthodontique avec Orthocaps® ? Faites le bon choix !

Élargissez votre gamme de prestations grâce à un système efficace et innovant adapté à tous les âges et à la plupart des indications. Avec Orthocaps®, visez un standard de qualité inégalé dans le domaine des aligneurs en proposant à vos patients confort et précision des résultats.

**+33 3 88 40 67 30**

**Nous serons ravis de répondre à votre appel !**

**Rendez-vous sur notre site internet :**

**[www.orthocaps.fr](http://www.orthocaps.fr)**



orthocaps®



RMO Europe, B.P. 20334 - 300 Rue Geiler de Kaysersberg  
67411 Illkirch Cedex - France

T +33 3 88 40 67 30 F +33 3 88 67 86 96

E [info@rmoeurope.com](mailto:info@rmoeurope.com)

[www.rmoeurope.com](http://www.rmoeurope.com) - [www.orthocaps.fr](http://www.orthocaps.fr)

Dispositifs médicaux sur mesure, fabriqués par Orthocaps - Réservé aux professionnels - - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur l'étiquette - 09/01/2019