

Faites de la magie!

Vers l'âge de trois ans, la tétine peut déjà disparaître au pays enchanté et à partir de quatre ans le pouce et compagnie ne devraient plus se retrouver en bouche mais devraient visiter le pays enchanté et être remplacés par *MUPPY*®!



MUPPY® avec grille anti-langue existe dans les tailles et modèles suivants:

*Pour la denture lactéale
(taille I, anneau rouge)*



*Pour la denture mixte
(taille II, anneau bleu)*





Pour en finir avec les
mauvaises habitudes

MUPPY®

avec grille
anti-langue


*MUPPY® l'écran buccal vestibulaire
d'après le Prof. Hinz
Pour le plus beau sourire d'enfant du monde*

Dr. Hinz
Dental
Dr. Hinz Dental-
Vertriebsgesellschaft
Ein Dr. Hinz Unternehmen

MUPPY® – L'écran buccal vestibulaire

Une solution idéale aux habitudes de succion nuisibles

- ◆ Aide à stopper toutes les formes de succion nuisibles
- ◆ Élimine les para-fonctions de la langue
- ◆ Renforce la musculature labiale
- ◆ Rééduque la fermeture labiale
- ◆ Supprime la respiration buccale
- ◆ Aide à éliminer les défauts d'élocution (le zézaïement par exemple)
- ◆ Favorise l'auto-guérison d'anomalies préexistantes
- ◆ Rétablit la fonction masticatoire inter-incisive

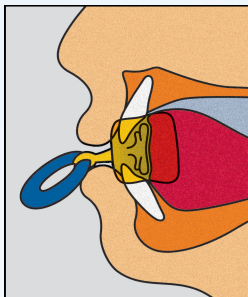

La grille anti-langue empêche l'interposition linguale entre les dents en cas d'absence de contact inter-incisif.

Les 6 règles d'utilisation du MUPPY®

L'expérience montre qu'à l'aide d'un écran buccal *MUPPY®* plus de 90% des enfants ont mis un terme à leurs habitudes de succion nuisibles. Votre soutien et quelques règles aident votre enfant:

1 L'écran buccal *MUPPY®* se substitue au pouce ou à la tétine. Le transfert de l'un vers l'autre doit se faire de façon volontaire et sans contrainte.

2 L'écran buccal *MUPPY®* doit être porté toutes les nuits.

3 L'écran buccal *MUPPY®* doit aussi être porté régulièrement de jour durant quelques heures (en jouant ou en regardant la télévision). Ceci est important afin que votre enfant change plus facilement ses habitudes.

4 En général, l'écran buccal *MUPPY®* supprime les habitudes de succion en une semaine. Participez pour éviter un retour à l'ancienne habitude: votre enfant devrait continuer à porter l'écran buccal *MUPPY®* la nuit pendant encore au moins six à huit semaines.

5 Lorsque l'écran buccal *MUPPY®* n'est pas porté, il doit retrouver sa place dans la boîte de rangement.


6 Ne pas oublier: de régulièrement se brosser les dents et de nettoyer l'appareil *MUPPY®*!

Causes habituelles

Sous "habitudes" on entend toutes les (mauvaises) habitudes qui pourraient perturber le développement normal des dents. Quelques exemples:

- ◆ La succion (des doigts, pouces, tétines, biberons, tissus, oreilles de peluches)
- ◆ L'interposition linguale entre les incisives
- ◆ La pression de la langue sur les dents, la succion labiale
- ◆ Se ronger les ongles, mâchonner des crayons
- ◆ Une déglutition atypique, une malposition de la langue
- ◆ Des troubles de l'élocution (le zézaiement par exemple)
- ◆ Des problèmes pour mordre et mastiquer
- ◆ La respiration par la bouche (conséquences: fréquentes affections respiratoires, avec l'âge apparition de troubles du sommeil dus au ronflement)

Conséquences des habitudes de succion nuisibles

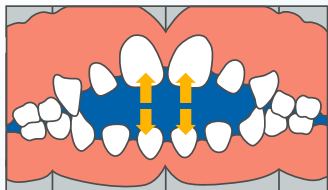

Une béance antérieure: due à l'interposition d'une sucette, d'une tétine ou du pouce.

Mis à part l'aspect souvent inesthétique, ces troubles du développement ont également des conséquences fonctionnelles ainsi que sur la santé: Votre enfant ne peut pas correctement mordre et avaler, il zézaie et respire par la bouche au lieu du nez, ce qui peut provoquer entre autre de fréquentes affections respiratoires.