

TRULOCK™

METAL CONDITIONER

CE 0483
263-00467/REV.-FR
REF J04023

DESCRIPTION:

TruLock™ Metal Conditioner doit être utilisé comme apprêt pour l'amalgame, l'or ou l'acier inoxydable. La surface métallique conditionnée fournira la surface de liaison optimale pour l'adhésif.

INDICATIONS:

TruLock™ Metal Conditioner est un apprêt utilisé pour améliorer la liaison entre tous les types de métaux (amalgame, or ou acier inoxydable) et les composites (et / ou adhésifs de liaison).

CONTRE-INDICATIONS:

TruLock™ Metal Conditioner is contre indicate pour les patients présentant des réactions allergiques a des composants methacrylates

ATTENTION:

- TruLock™ Metal Conditioner est inflammable, garder le à l'écart de toute source d'ignition.
- Evitez le contact avec les yeux et les tissus mous. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment et copieusement d'eau les yeux ouverts durant au moins 15 minutes. Contactez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau, lavez avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste consultez un médecin.

PRECAUTIONS GENERALES:

- Aux Etats-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente de ce produits que sur ordonnance ou par un médecin.
- Avant de débiter le traitement, lire les instructions et la FDS.
- Utiliser conformément aux instructions.

EFFETS INDESIRABLES:

Des affections cutanées, oculaires et respiratoires allergiques ou préexistantes peuvent être aggravées par l'exposition à ce produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

1. Isolez la dent à réparer avec des rouleaux de coton et / ou une digue en caoutchouc.
2. Rendre rugueuse la surface métallique à coller avec une fraise diamantée moyenne ou un microetcher. Si de l'émail est présent, mordre pendant 15 secondes avec TruLock™ Etchant. Suivez toujours les instructions du fabricant et consulter l'étiquetage du produit avant l'utilisation.
3. Rincez soigneusement la surface métallique attaquée, avec de l'eau et séchez à l'air comprimé exempt d'humidité
4. Appliquez une mince couche uniforme de TruLock™ Metal Conditioner sur la surface en métal rugueuse. Attendez 20 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit sèche et passer légèrement de l'air sur la surface de métal conditionnée pour évaporer les éléments volatiles restants.
5. Procéder au scellement ou à la réparation conformément aux instructions du fabricant et consulter l'étiquetage du produit avant l'utilisation.

STOCKAGE:

- Stocker le produit entre 2°C/36°F à 27°C/80°F, et le porter à température de la pièces avant utilisation (22°C/72°F). Ne pas geler. Vérifier la date de péremption indiquée sur le conditionnement.
- Le produit est volatile refermez le immédiatement après usage.