

TRULOCK®

CONDITIONNEUR PORCELAINE

REF J04022

RMO®

DESCRIPTION

TRULOCK conditionneur Porcelaine est un agent de couplage silane dans une base d'alcool qui est utilisé pour améliorer la liaison entre la porcelaine et le composite et/ou l'adhésif de liaison. Les agents de couplage au silane ont deux fonctions : ils réagissent avec la surface de la porcelaine et copolymérisent avec la matrice de résine du composite sur la porcelaine.

INDICATIONS POUR UTILISATION

Traiter les surfaces en porcelaine dentaire avant l'application du matériau composite et/ou de l'adhésif de collage afin d'améliorer l'adhérence.

AVERTISSEMENT

- TRULOCK Conditionneur porcelaine est inflammable, tenir à l'écart de toute source d'ignition.
- Éviter tout contact avec les yeux et les tissus doux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes. Consulter immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

PRECAUTIONS GENERALES

- Les lois fédérales américaines limitent l'utilisation de ce produit aux seuls dentistes ou sur leur ordre.
- Lire les instructions et la FDS (rmortho.com) avant de commencer le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.

EFFETS INDESIRABLES

Les conditions allergiques ou préexistantes de la peau, des yeux et des voies respiratoires peuvent être aggravées par l'exposition à ce produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Isoler la dent à réparer à l'aide de rouleaux de coton et/ou d'une barre en caoutchouc.
2. Rincer et sécher la surface de collage en porcelaine.
3. Mordancer la surface de la porcelaine en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - a. Appliquer le décapant approprié à base d'acide fluorhydrique en suivant les instructions du fabricant, et revoir l'étiquetage du produit avant utilisation.
 - b. Sabler la surface de la porcelaine, puis appliquer ensuite un traitement de 15 secondes avec l'agent de mordantage TRULOCK®, conformément aux instructions du fabricant, et examiner l'étiquette du produit avant de l'utiliser.
4. Rincez abondamment la surface de la porcelaine mordancée avec de l'eau et séchez-la avec de l'air comprimé exempt d'humidité. La surface gravée doit apparaître terne et d'un blanc givré.
5. Appliquer une couche fine et uniforme de TRULOCK Conditionneur Porcelaine sur la surface mordancée de la porcelaine. Attendre 60 secondes ou jusqu'à séchage. Sécher légèrement à l'air la surface de porcelaine conditionnée afin que toutes les substances volatiles restantes s'évaporent.
6. Procéder au scellement ou à la réparation conformément aux instructions du fabricant et examiner l'étiquetage du produit avant de l'utiliser.

STOCKAGE

- Les conditions de stockage recommandées sont comprises entre 2°C/36°F et 27°C/80°F, en ramenant le produit à température ambiante avant de l'utiliser (22°C/72°F). Ne pas congeler. Voir la date de péremption sur l'emballage extérieur.
- La matière est volatile, sceller le récipient immédiatement après utilisation.



EMEIGO EUIPOE
WestervoortseOijk 60
6 8 2 7 AT, Arnhem
Pays-Bas



2155 Eastwood Drive
Franklin, IN 46131 USA
www.rmortho.com



Dental Technologies, Inc.
6901 N. Hamlin Avenue
Lindolnwood, IL 60172 USA



CE
0459

263-00466 Rév. B