

Notice d'utilisation

Ortho-Jel® Adhesive

Des couches d'adhésif sont conseillées afin d'assurer une bonne adhérence du matériau d'empreinte sur le porte-empreinte et pour éviter toute déformation lors de la prise d'empreinte.

Indications

Ortho-Jel® Adhesive assure une parfaite adhérence entre les silicones par addition et les porte-empreintes en métal ou méthacrylate.

Note : L'adhésif n'assure pas toujours une parfaite adhérence aux portes-empreinte en plastique ou individuels en plaque base.

Procédure

Appliquer une fine couche d'Ortho-Jel® Adhesive sur le porte-empreinte à l'aide du pinceau applicateur et laisser sécher **3 minutes** au moins. Charger le porte-empreinte et procéder à la prise d'empreinte.

Nettoyage du porte-empreinte

La couche d'Ortho-Jel® Adhesive peut être enlevée du porte-empreinte avec de l'acétone.

Avertissement

Utiliser Ortho-Jel® Adhesive uniquement dans des zones bien ventilées. En cas du contact accidentel avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Stockage

Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C (78°F).

Ne pas utiliser au delà de la date de péremption.

Garantie

RMO Europe garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication. RMO Europe ne donnera aucune autre garantie y compris toute garantie implicite de vente ou d'adaptation à un usage particulier. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation.

Si le produit s'avère défectueux au cours de la période de garantie, l'obligation de RMO Europe et votre recours se limitent à la réparation ou au remplacement du produit défectueux.

Limitation de responsabilité

Sauf là où la loi l'interdit, RMO Europe ne pourra être tenue responsable de la perte ou des dommages causés par ce produit, directs ou indirects, généraux, particuliers, accidentels, consécutifs, quel que soit l'argument juridique avancé, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou responsabilité stricte.

Tenir hors de portée des enfants

Réservé à l'usage professionnel à usage dentaire.