


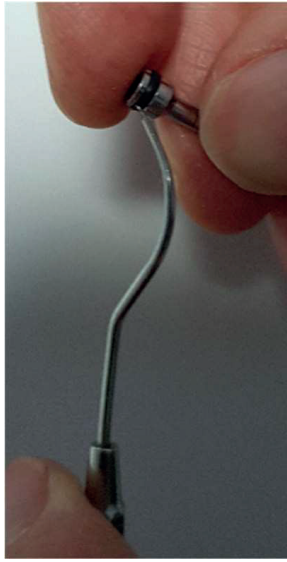

INSTRUCTIONS DE MONTAGE D'UN JOINT SOUPLE

ATTENTION : Le sachet ci joint contient 3 billes et un joint, merci de lire les instructions ci-dessous avant utilisation.

Concerne les clés embout pour mini-vis tête bracket (ECG0300 & ECG0310)



Cette clé embout présente à l'une de ses extrémités, 3 logements dans lesquels devront s'insérer 3 billes qui, à leur tour, seront maintenues par un joint souple.

<p>Etape 1 : Insérer une des 3 billes dans son logement et maintenez là avec le nouveau joint souple.</p> 	<p>Etape 2 : A l'aide d'une sonde ou de tout instrument permettant de déplacer le joint sans l'abîmer, soulever le partiellement.</p> 	<p>Etape 3 : Tout en maintenant le joint entrouvert, avec une précelle fine introduisez la seconde bille dans son logement.</p> 	<p>Etape 4 : Laisser le joint se remettre en place pour maintenir les 2 billes. Répétez l'opération avec la 3^{ème} et dernière bille.</p> <p>Etape 5 : Clipser une mini vis tête bracket pour tester votre changement de joint</p>
--	--	---	---

