

Instructions



6

Refermer la base en revissant la vis
Close the base by screwing back the screw



7

Insérer les dents en métal
Insert metal teeth



8

Les derniers ajustements utiles peuvent être réalisés manuellement
Final adjustments can be made manually



9a



Modèle terminé
Finished model



9b

Modèle terminé
Finished model

TYPODONT "SANKIN"

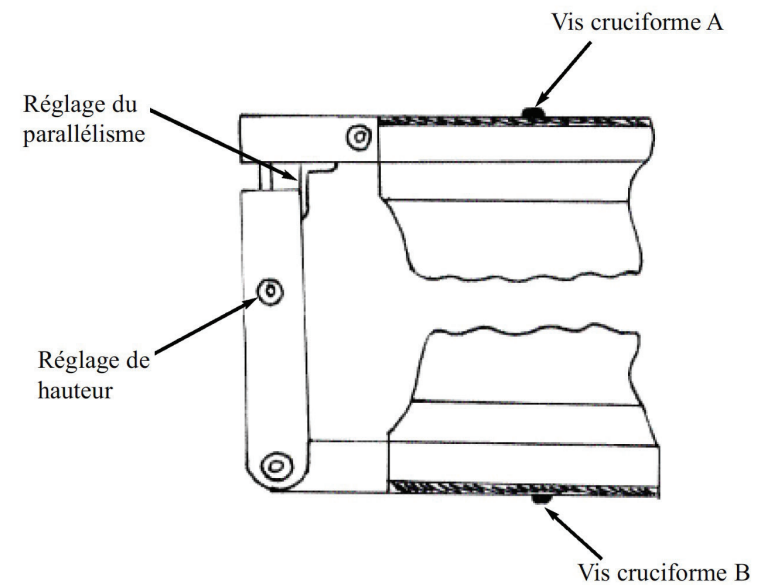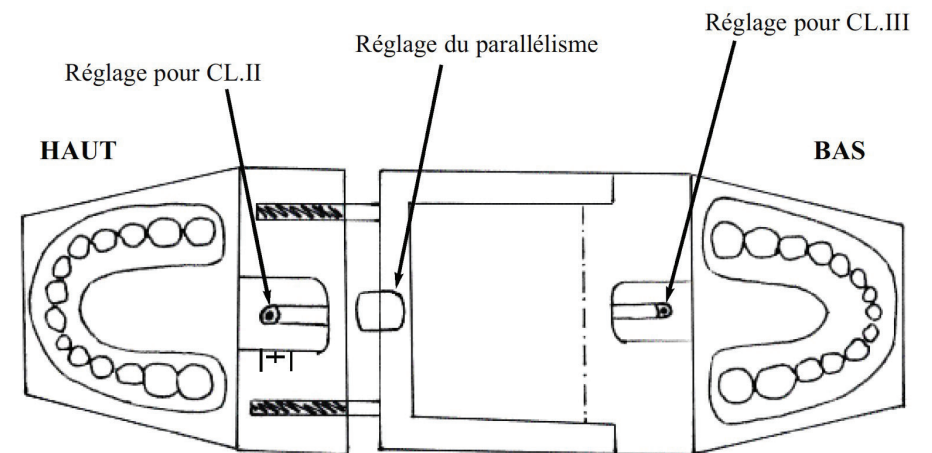

Conseils pour le montage du Typodont


Le bénéfice que vous tirerez du travail sur typodont dépendra essentiellement de la mise en place correcte des bagues et des attachements.

Il est hors de question de ne pas faire soi-même ce travail préparatoire. Emprunter un typodont tout préparé ou faire exécuter ce travail par un technicien pas forcément compétent en technique multibague est une erreur majeure.

METHODOLOGIE POUR LE MONTAGE DU TYPODONT

- Baguer les molaires et fixer les attachements en vérifiant leur bonne position (se renseigner auprès des organisateurs du cours).
- Ouvrir les socles métalliques (pour dévisser les vis cruciformes A et B, il faut sortir les arcades SUP et INF en ouvrant les écrous CL.II et CL.III. Les poser sur un plan horizontal bien stable et solide. Afin de ne pas abîmer les vis A et B, ne pas forcer quand elles sont bien serrées mais utiliser un tournevis cruciforme adapté). Insérer les cires préformées. Les parois tronçonniques assurent le maintien. La cire est bloquée quand elle affleure la platine. Faire fondre de la cire rose sur le pourtour gingival pour assurer le scellement.
- Revisser les socles.
- En utilisant la butée, s'assurer que les socles sont parallèles.
- Présenter les 4 dents de 6 ans dans leurs alvéoles respectives ; les cires étant préformées pour une malocclusion donnée, il ne doit y avoir que quelques réglages minimaux dans le sens antépostérieur. Affiner, si nécessaire avec la vis de réglage.
- Sceller les dents en faisant couler de la cire rose fondue dans les alvéoles (pas de la cire collante) en commençant par les molaires.
- Insérer les dents de 6 à 1, en surveillant l'occlusion et en assurant les malpositions souhaitées.
- Ne pas brutaliser les alvéoles à la spatule. Elles doivent garder leur galbe original à quelques coulures près (Rappelez-vous que c'est la cire fondue dans l'alvéole qui assure le scellement).
- Ebarber - Nettoyer - Lustrer pour la présentation.
- Serrer la vis de blocage pour garder le parallélisme des bases.
- Dévisser les deux bases métalliques. Ne les intervertissez pas. La base mandibulaire a un ergot qui traverse la platine et vient s'insérer dans l'armature du typodont.
- Insérer les cires et sceller le long des pattes de scellement avec de la cire rose fondue.
- En tout état de cause, utiliser des dents récentes qui assurent une occlusion convenable.

Instructions

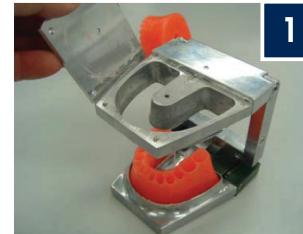


Retirer la base en dévissant la vis centrale

Detach the base plate by unscrewing the plus screw at the center of base



Réchauffer et assouplir la cire préformée à l'eau chaude afin de faciliter son introduction dans le typodont

Heat and soften the preformed wax with hot water to facilitate its introduction into the typodont.

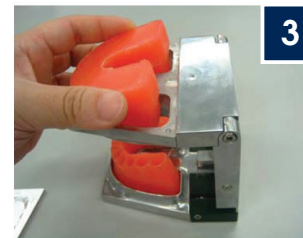

Insérer la cire préformée assouplie dans le typodont

Insert pre-formed, softened wax into the typodont



Ajuster la cire préformée assouplie dans le typodont (cf. photo)

Fit preformed, softened wax into typodont (see photo)



Ceci est la surface idéale à obtenir

This is the ideal surface to obtain