




Illustration de restauration composite en couches

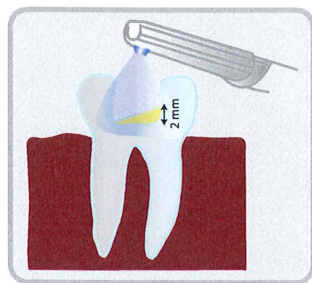

Etape 1:
polymériser pendant 1 seconde

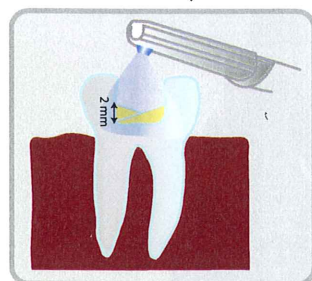

Etape 2:
polymériser pendant 1 seconde

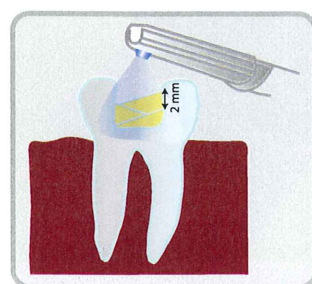


Etape 3:
polymériser pendant 1 seconde




Etape 4:
polymériser pendant 1 seconde

Option 1

Option 2

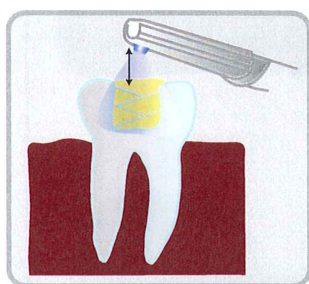

Etape 5:
polymériser pendant
3 secondes, retoucher
et polir la restauration

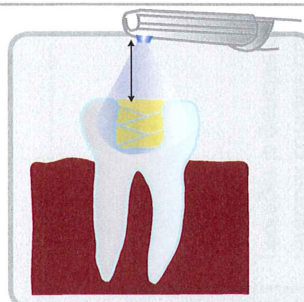

Etape 5:
polymériser pendant
1 seconde. Retoucher
la restauration



Etape 6:
polymériser pendant
3 secondes. Polir la
restauration


Restaurations classe V



Polymériser pendant 3 secondes.
Toujours utiliser le capuchon et
l'embout conique pour
protéger la gencive de la chaleur.



FlashMax2

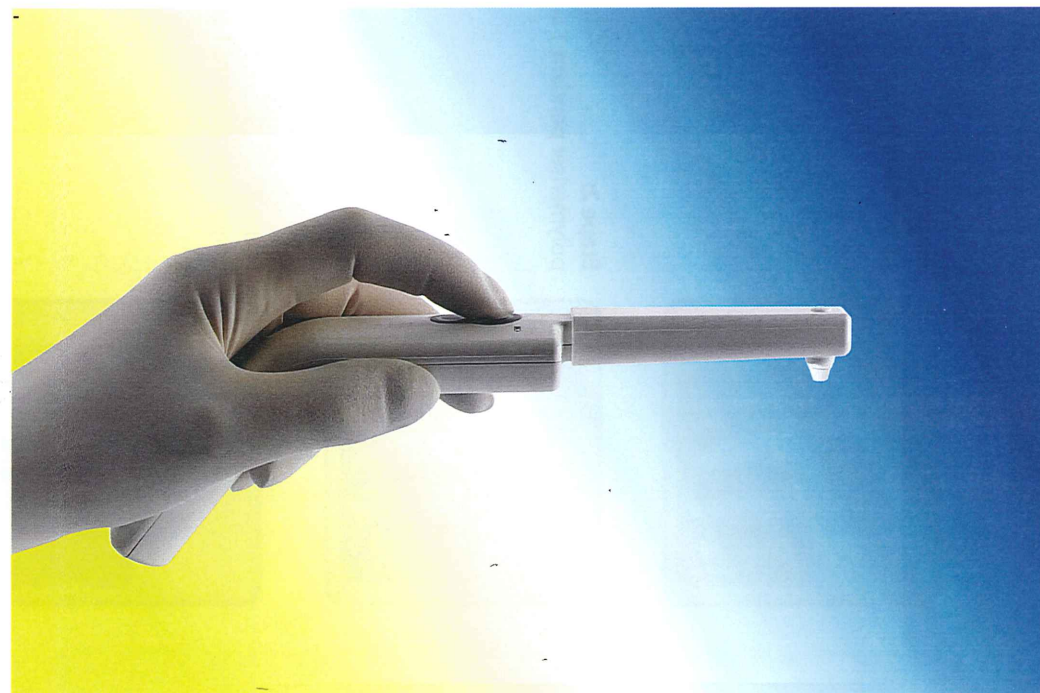

Instructions de traitement Trucs et conseils

Fabriqué par:

CMS Dental ApS
Njalsgade 21 G
2300 Copenhagen S
Denmark

www.cmsdental.com
info@cmsdental.dk
Tlf: +45 32 57 30 00
Fax: +45 32 57 10 23



Fransk

CMS Dental ApS
Njalsgade 21 G
2300 Copenhagen S
Denmark

www.cmsdental.com
info@cmsdental.dk
Tlf: +45 32 57 30 00
Fax: +45 32 57 10 23

