

DESCRIPTION:

TruLock™ Porcelain Conditioner est un agent de couplage au silane dans une base d'alcool utilisé pour améliorer la liaison entre la porcelaine et l'adhésif composite et / ou de liaison. Les agents de couplage au silane ont deux fonctions: ils réagissent avec la surface de la porcelaine et se co-polymérisent avec la matrice de résine du composite. Il en résulte une augmentation de la liaison physique, mécanique et chimique du composite à la porcelaine.

INDICATIONS:

A utiliser pour traiter les surfaces dentaires en porcelaine avant application d'un matériau composite et/ou d'un adhésif de collage pour améliorer le collage.

ATTENTION:

- TruLock™ Porcelain Conditioner est inflammable, garder le à l'écart de toute source d'ignition.
- Evitez le contact avec les yeux et les tissus mous. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment et copieusement d'eau les yeux ouverts durant au moins 15 minutes. Contactez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau, lavez avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste consultez un médecin.

PRECAUTIONS GENERALES:

- Aux Etats-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente de ce produits que sur ordonnance ou par un médecin.
- Review instructions Avant de débiter le traitement, lire les instructions et la FDS. Utiliser conformément aux instructions.

EFFETS INDESIRABLES:

Des affections cutanées, oculaires et respiratoires allergiques ou préexistantes peuvent être aggravées par l'exposition à ce produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

1. Isoler la dent à réparer avec des rouleaux de coton et / ou une digue en caoutchouc.

2. Rincez et séchez la surface de collage en porcelaine.

3. Mordancez la surface de la porcelaine en utilisant l'une des méthodes suivantes:

- a. Appliquer l'agent d'attaque chimique à l'acide fluorhydrique approprié en suivant les instructions du fabricant, et consulter l'étiquetage du produit avant l'utilisation.
- b. Sabler la surface de la porcelaine, puis effectuer un traitement TruLock™ de 15 secondes en suivant les instructions du fabricant, et consulter l'étiquetage du produit avant utilisation.

4. Rincez soigneusement la surface en porcelaine mordancée à l'eau et séchez avec de l'air comprimé exempt d'humidité. La surface mordancée devrait apparaître terne et blanc givrée.

5. Appliquer une mince couche uniforme de conditionneur en porcelaine TruLock™ sur la surface en porcelaine mordancée. Attendez 60 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Sécher légèrement à l'air la surface de la porcelaine conditionnée pour évaporer les éléments volatiles restants.

6. Procéder au scellement ou à la réparation conformément aux instructions du fabricant et consulter l'étiquetage du produit avant l'utilisation.

STOCKAGE:

- Stocker le produit entre 2°C/36°F to 27°C/80°F, et le porter à température de la pièces avant utilisation (22°C/72°F). Ne pas geler. Vérifier la date de péremption indiquée sur le conditionnement.
- Le produit est volatile refermez le immédiatement après usage.